


● Mode d'emploi

Simulateur d'examen rectal et prostate

Référence : KKMW20

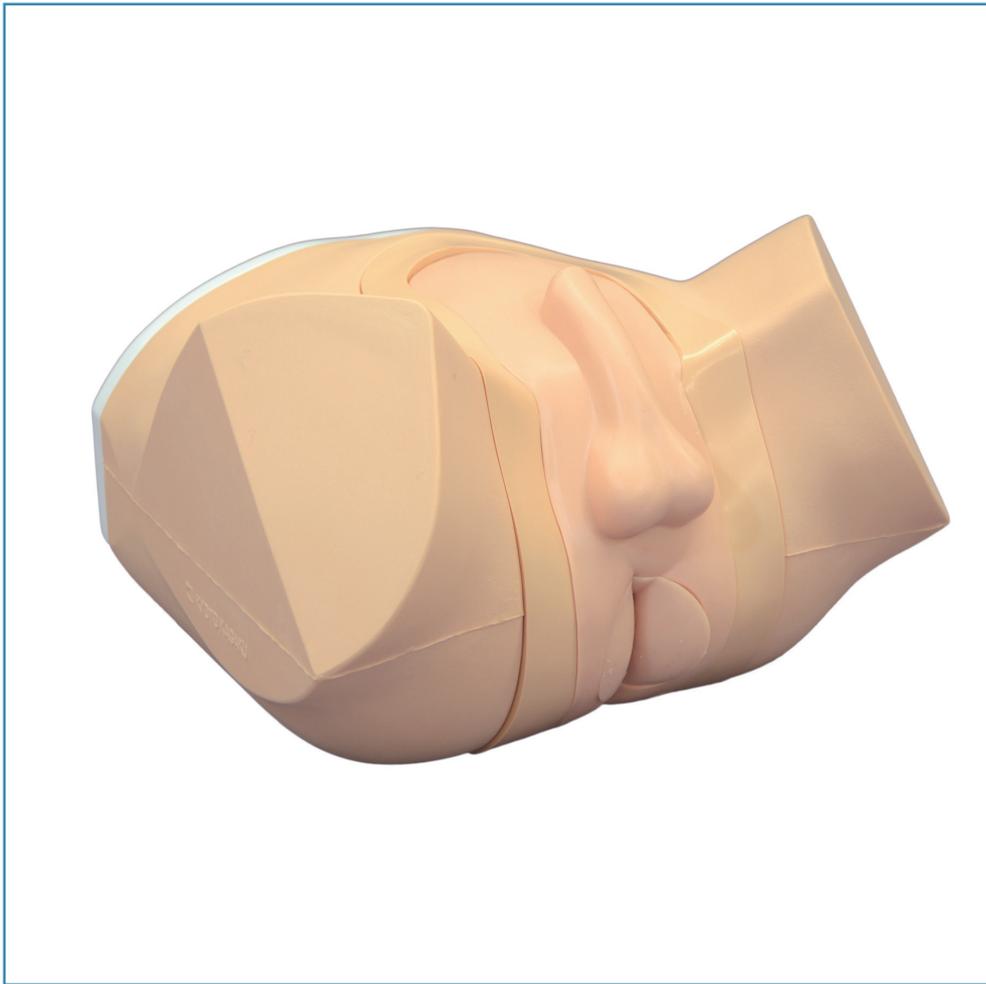

Distribué par


Medicalem
Parce que la Vie est précieuse

Fabriqué par

 **KYOTO KAGAKU co., LTD**
SINCE 1948

Sommaire


Contenu	2
Précautions d'utilisation	3
Type de simulation	3
Préparation	
Mise en place	4-7
Mise en place	4
Insert rectal	5
Unité de palpation	6
Assembler les deux unités	7
Changer les pathologies	
Changer les pathologies	8-11
Changer les pathologies	8
Remplacement du module	9
Remplacement de l'insert	10-11
Informations SAV	
Informations SAV	12



Le produit neuf se présente comme la photo ci dessus lors de la livraison

Contenu

Avant d'utiliser le modèle, vérifiez que tous les éléments sont présents

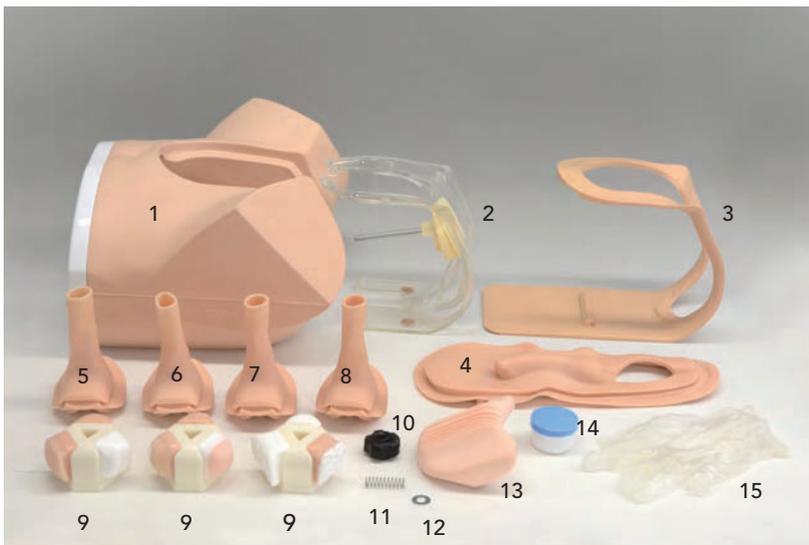

1. Unité centrale	1
• Support de pathologies	
2. Support interne	1
3. Support	1
4. Peau externe	1
• Inserts rectaux	
5. Normal	1
6. Cancers rectaux	1
7. Cancers rectaux	1
8. Rectum avec polypes	1
9. Module de cas	3
10. Poignée de serrage	1
11. Ressort	1
12. Rondelle	1
13. Coussin	1
14. Lubrifiant	1
15. Gants	1
Boîte de rangement	1
(non visible)	

● Précautions d'utilisation

A faire

- Les matériaux utilisés pour la création de ce modèle sont composés de silicone fragile, veuillez le manipuler avec le plus grand soin
- Manipuler avec précaution
- Utilisez de la vaseline
- Rangement
- Lubrifiez-bien votre doigt lors des différentes palpation
- Rangez le modèle à température ambiante et hors de la lumière du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas

A éviter

- N'utilisez jamais de solvant chimique pour nettoyer le modèle (particulièrement la peau)
- N'écrivez pas sur le modèle avec un stylo et ne laissez pas de document imprimé dessus.
- Les tâches d'encre sur le silicone sont indélébiles.
- **N'écrivez pas sur le modèle avec un stylo et ne laissez pas de document imprimé dessus. Les tâches d'encre sur le silicone sont indélébiles**

● Simulation

Supination



Position latérale



Pronation




Préparation

● Mise en place

1. Séparez les support de l'unité centrale en dé-scratchant le velcro



2. Tirez le velcro vers l'extérieur pour le sortir de la fente

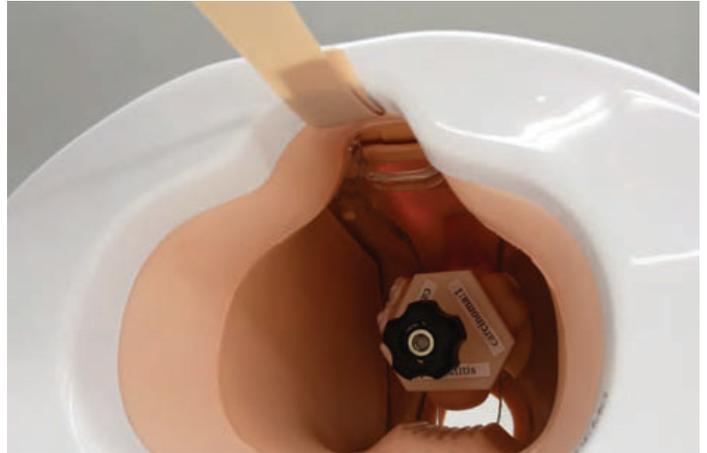

3. Vous pouvez à présent retirer les supports




Retirez le support de pathologies



4. Retirez le module (attaché avec deux pièces de velcro)



5. Vous pouvez à présent retirer le support externe en le soulevant et en appliquant une pression sur la peau et le support interne.

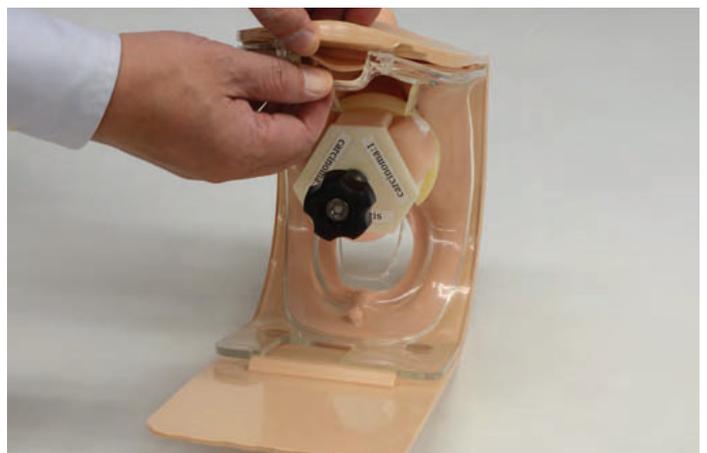


6. Séparez le support interne du support externe




7. Retirez la peau



8. Positionnez l'insert dans le support interne en faisant bien attention à l'orienter correctement

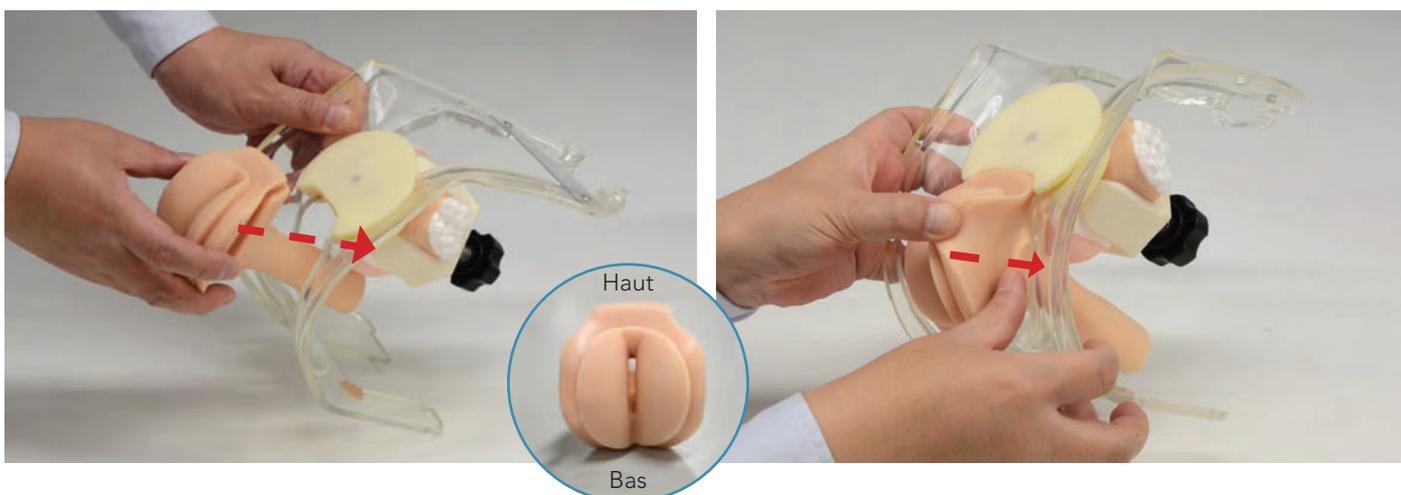

Assurez-vous que l'insert est bien accroché au support.

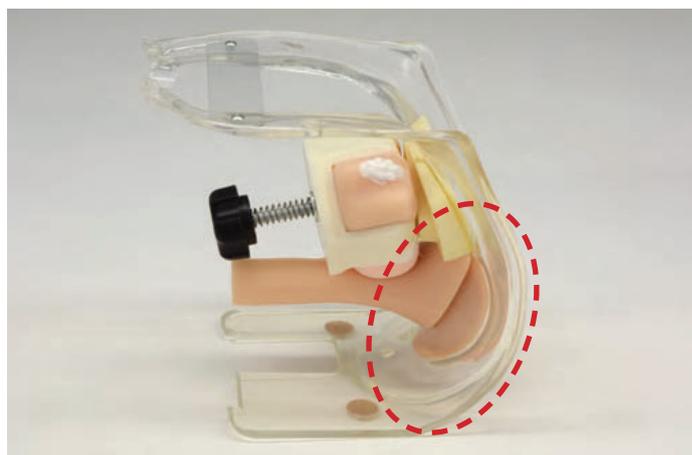


* Manipulez la peau avec précaution, elle peut se déchirer rapidement.

Préparation

● Unité de palpation

9. Attacher la peau au support

a. Insérez les picots de peau dans les trous

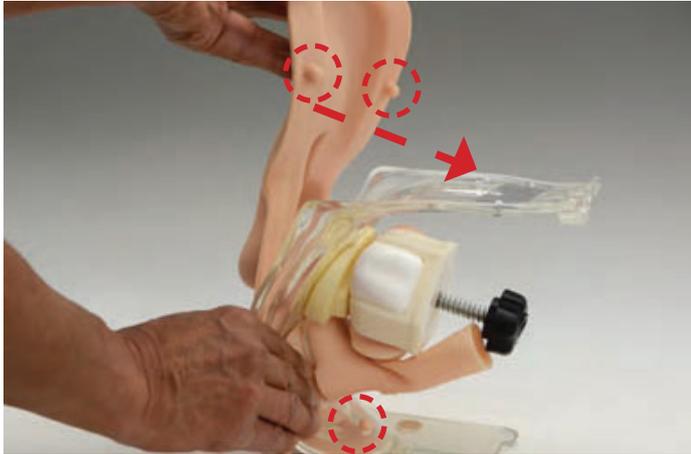

b. Alignez la peau avec le rectum



10. Attacher le support externe

a. Positionnez le support interne comme indiqué






b. Alignez la peau et le support externe



c. Exercez une pression sur les extrémités du support externe.



11. Attacher le coussin : Il vous suffit de le positionner dans le bon sens et d'accrocher les velcros

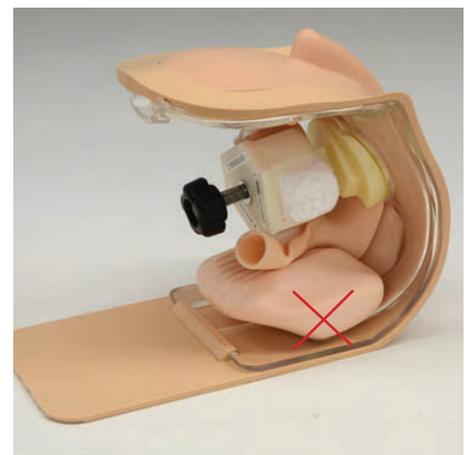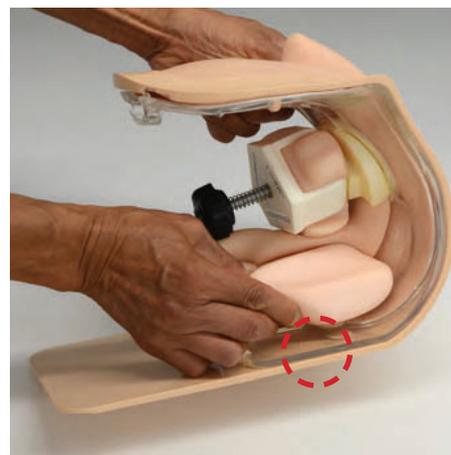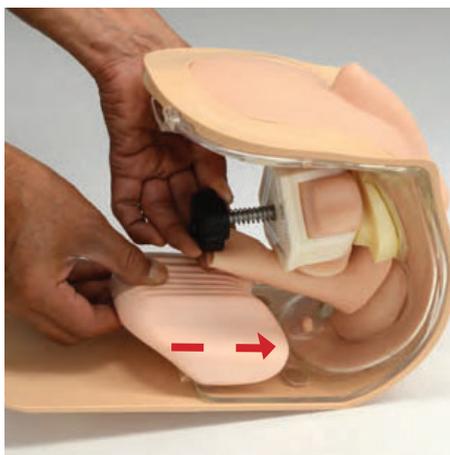


* Attention à ne pas tordre l'insert



Assembler les deux unités ●

1. Insérez l'unité assemblée dans le bassin


La plaque du support externe doit venir se glisser dans la base blanche du bassin.

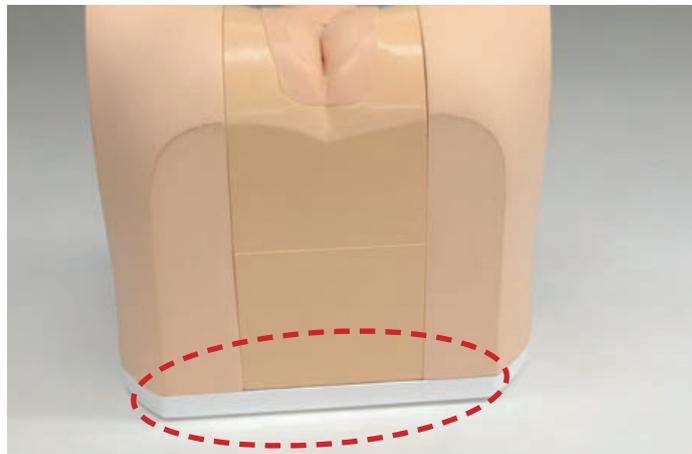

2. Utilisez le velcro pour maintenir les supports et le bassin ensemble

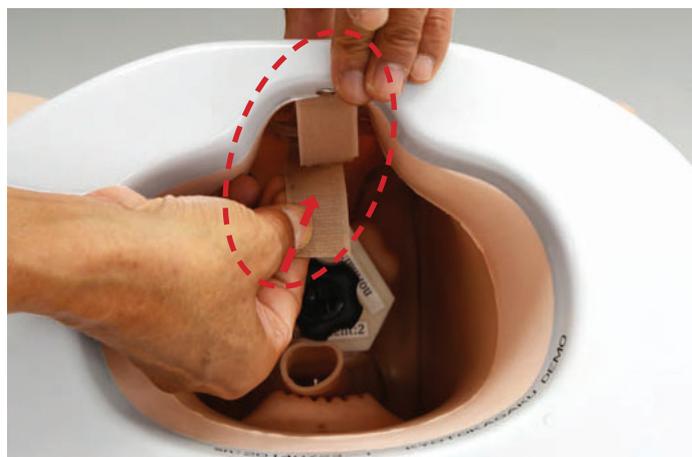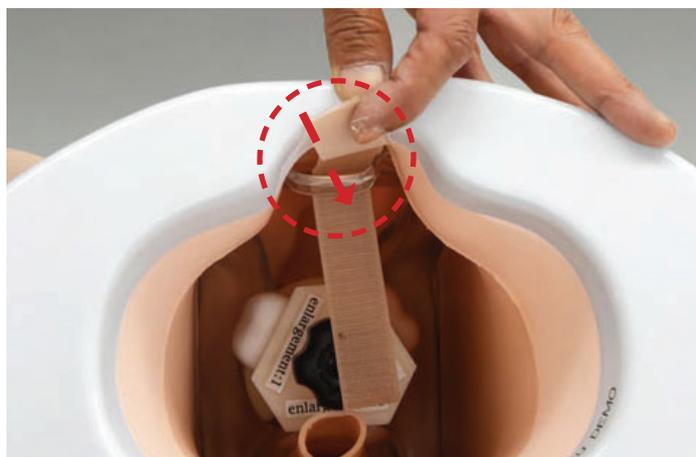




3. Le modèle est prêt

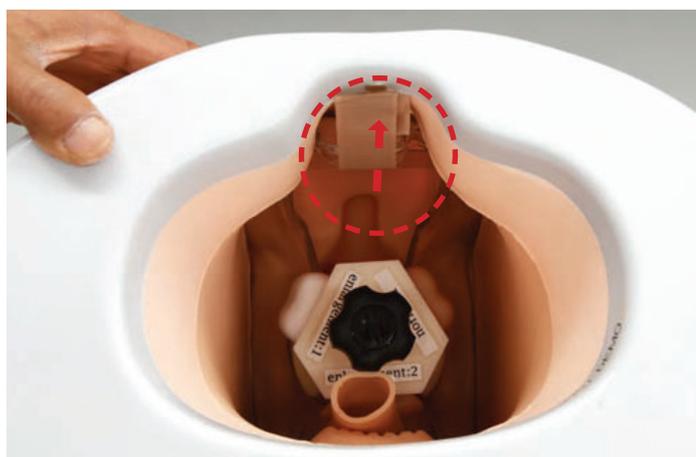

Changer la pathologie



● Changer la pathologie

1. Il y a trois pathologies sur chaque module et il vous suffit de faire tourner le module pour alterner. Pour changer de pathologie sans détacher les supports du bassin, appliquer une pression sur l'insert vers le bas, tirez légèrement le module en arrière puis tournez-le.

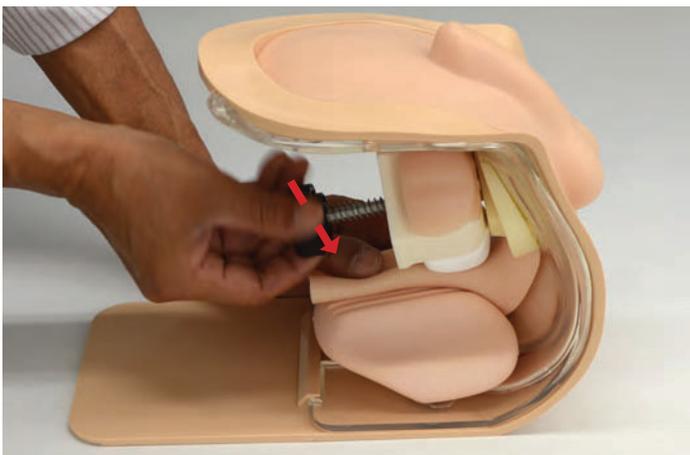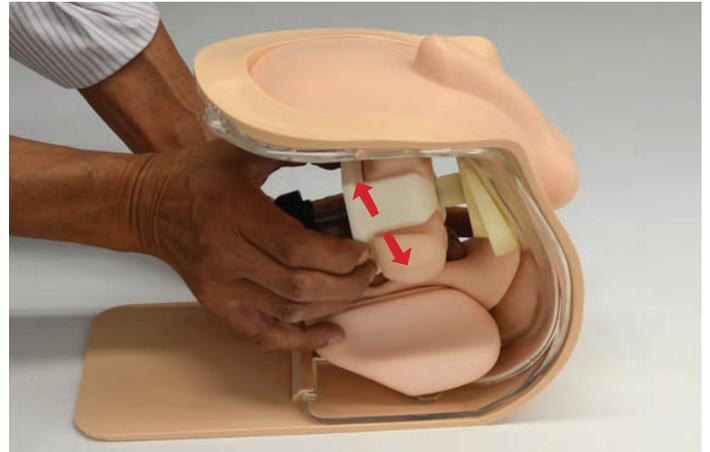
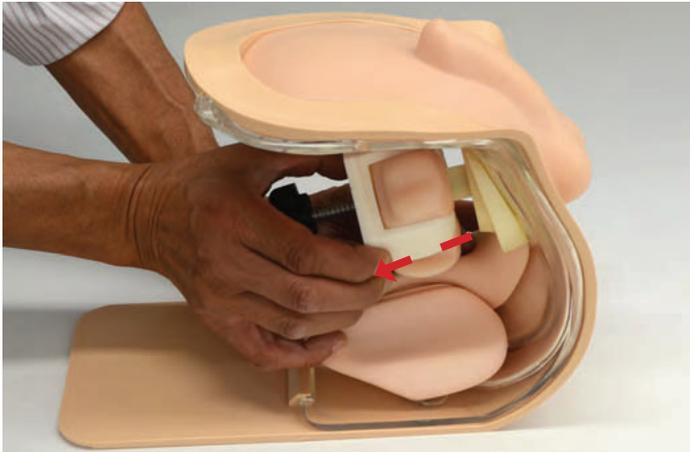


* Les photos montrent comment changer de pathologie sans le bassin mais il est possible de faire cette manipulation avec le modèle assemblé


1. Pour retirer le module, dévissez la poignée puis retirez le ressort et la rondelle.

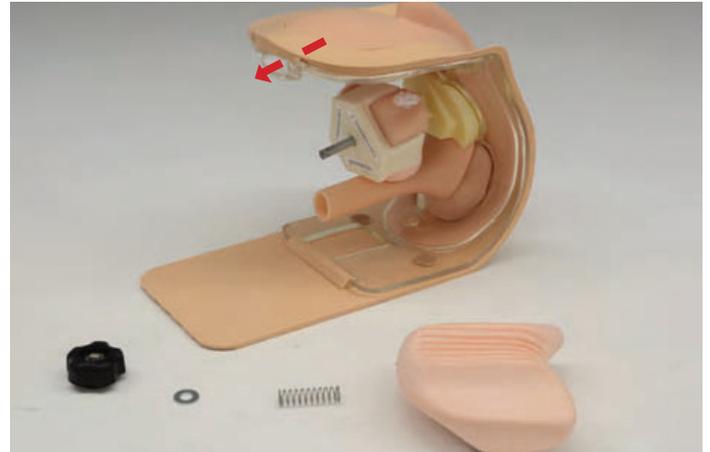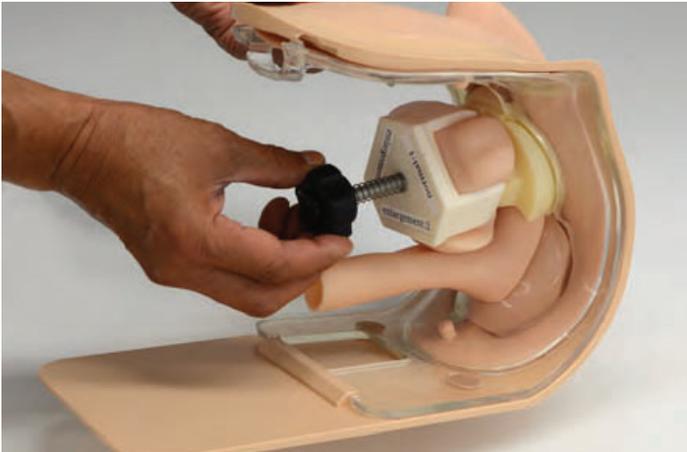

2. Une fois que vous avez retiré l'ancien module, vous pouvez insérer le suivant en faisant correspondre les triangles (entourés en rouge).

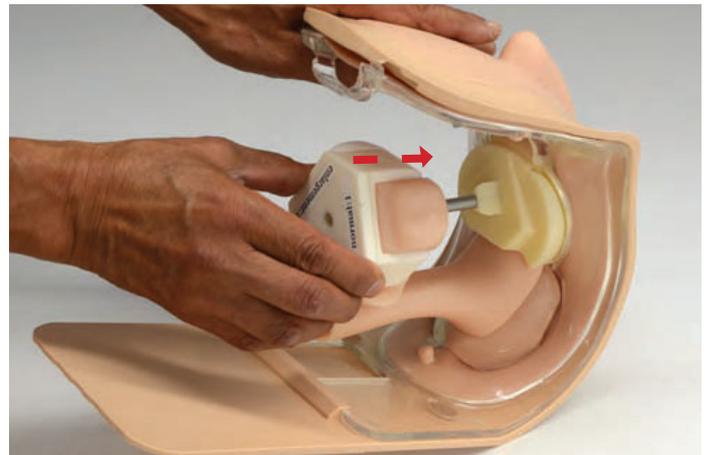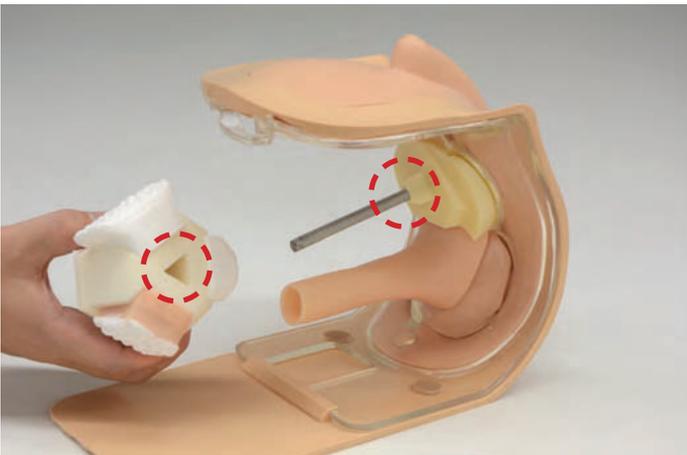


3. Il ne vous reste qu'à refaire l'étape 1 dans le sens inverse (rondelle puis ressort et enfin poignée) Attachez ensuite le coussin

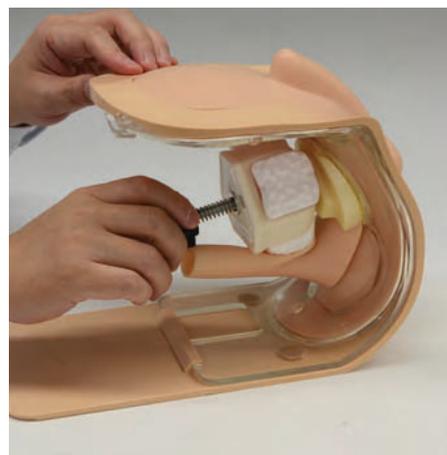


Changer la pathologie

● Remplacement de l'insert rectal


1. Retirez les supports du bassin sans oublier la bande de velcro au dos

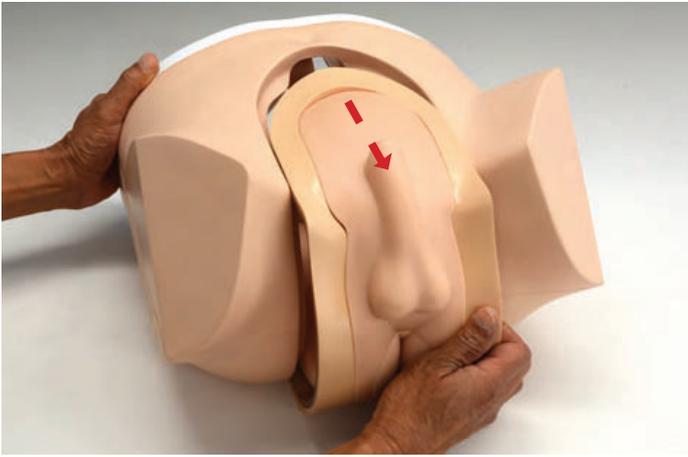



2. Séparez les supports interne et externe.

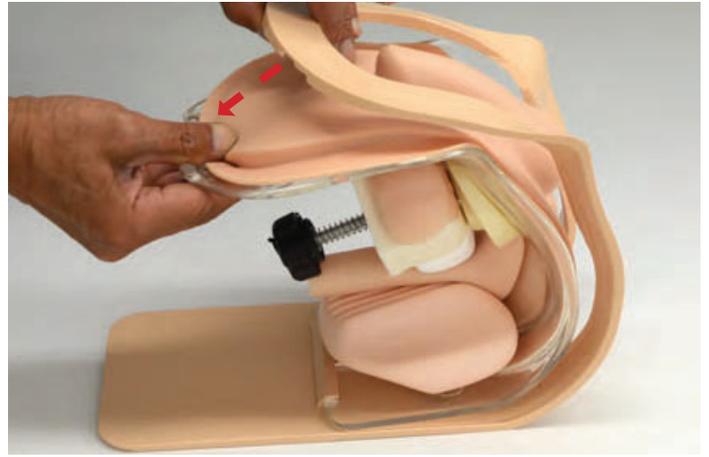

3. Retirez le coussin puis la peau

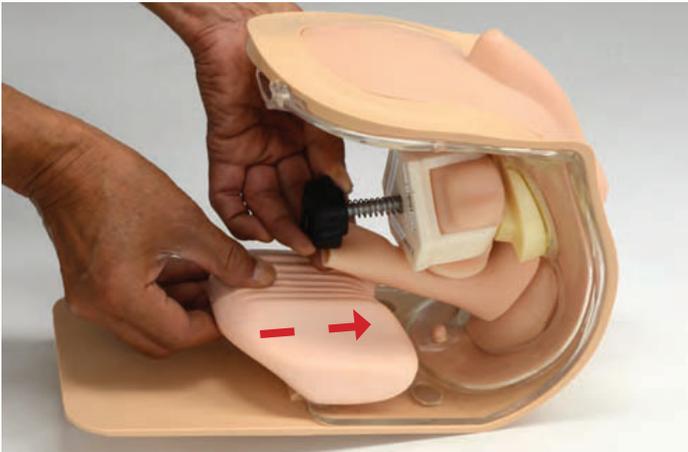


3. Exercez une pression vers le bas dans la zone entourée en rouge puis tirez l'insert vers l'extérieur.

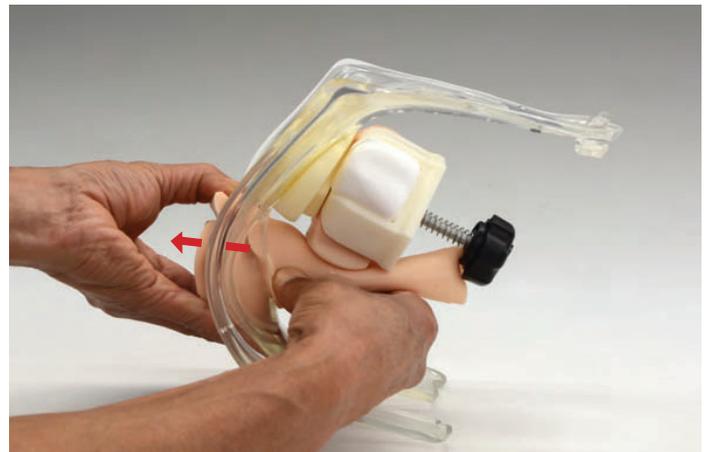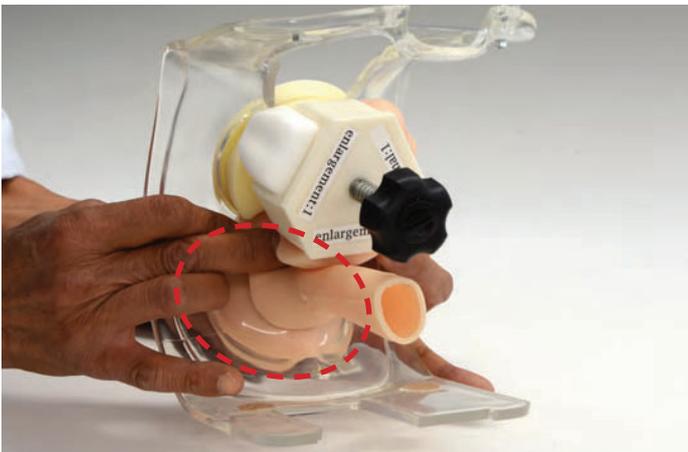


* Attention a ne pas tirer trop fort sur la peau

4. Placez le nouvel insert dans le support interne et assurez-vous qu'il est bien accroché

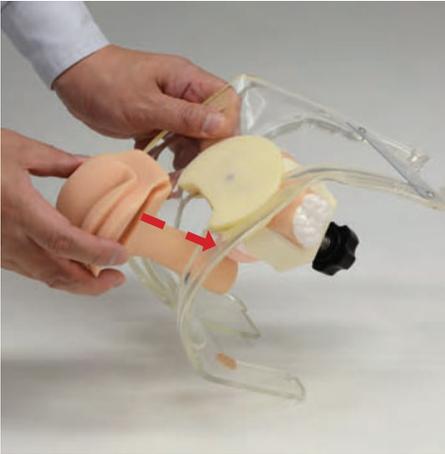

5. Attachez la peau au support interne


a. Insérez les picots de peau aux endroits correspondants.

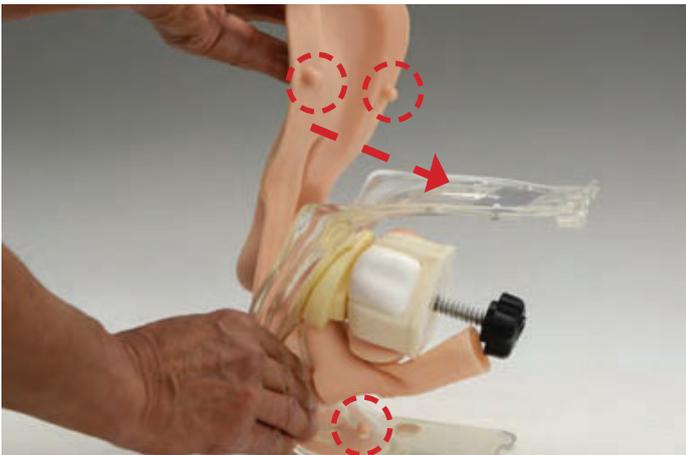

b. Alignez la peau avec le rectum



6. Assemblez le support externe puis le coussin

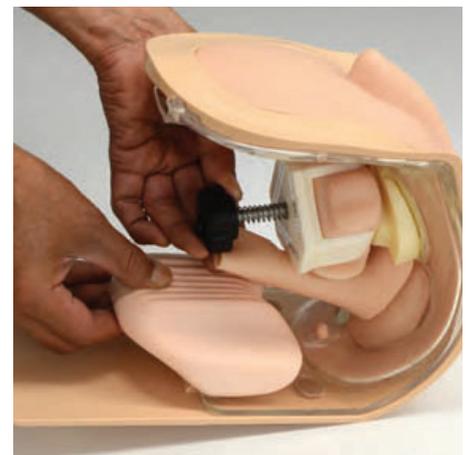

Distribué par



6 Bld Georges Marie Guynemer
ZA Charles Renard Bât 3
78210 Saint Cyr L'école
Tél. : 01 39 16 71 90
medicalem@medicalem.com
www.medicalem.com



Fabriqué par



Worldwide Inquiries & Ordering

Kyotokagaku Head Office and Factories:

15 Kitanechoya-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8388, JAPAN

Tel: +81-75-605-2510 Fax: +81-75-605-2519

Kyotokagaku USA Office: USA and Canada sales and services

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA

Tel: 1-310-325-8860 Fax: 1-310-325-8867